

MİKRO ALTIN İĞNELİ
ÖRÜMCEK AĞI ETKİLİ VAKUMLU
FRAKSİYONEL RADYOFREKANS



SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ GELİŞİMİ

Medikal alanda uzun yıllardır **CROSS ALLURA** Radyofrekans yöntemi başarıyla cilt ve kozmetoloji alanında da uzun süreden beri kullanılmaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji bu yöntemin oldukça gelişmesini sağlamıştır. Bu durum klasik Radyofrekans metoduna yeni özellikler eklenmesi ile çok etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.

YENİLİK- 1 FRAKSİYONEL ÖZEL TASARIM

İlk olarak Radyofrekans yöntemi Fraksiyonel hale getirilmiştir. Bu teknikte uygulanacak güç, bir bütün halinde değil, yan yana birçok küçük noktadan cilde nüfus etmektedir. Bu sayede arada kalan sağlam dokular sayesinde hasarın çok daha az olması sağlanmıştır.

İkinci kuşak radyofrekans cihazları olan "fraksiyonel radyofrekans" daha çok bilinen adı ile Thermage (termaj) cihazımız piyasada yerini almıştır. Halen geniş kullanım alanı bulunan Radyofrekans cihazı olan termajda derinin tüm katmanları etkilenmektedir.

YENİLİK- 2 ALTIN MİKRO - İĞNELER


Bu aşamadan sonra eklenen ikinci yenilik ise mikro - iğneler ile cildin doğrudan içine enerji akımını veren üçüncü kuşak Radyofrekans cihazlarıdır.

Mikro-iğneler ile donatılmış olan Radyofrekans cihazının akım çıkışı sağlayan ünitesi derinin üst tabakası olan epidermisi atlayıp, dermis denen orta tabakaya ulaşmaktadır. Kullanılan iğnelerin derinlikleri cihaz üzerinden 0.5 ile 3.0 mm arasında ayarlanabilmektedir. Bu teknolojide kullanılan iğneler altından yapıldığı için bu yöntem "altın iğne" olarak anılmaktadır.

Bu yöntem de yapılan bir yeni diğer aşama ise akımın tüm iğne boyunca değil, yalnızca iğnenin ucundan verilmesidir. Böylece çok daha az hasar ile çok daha güzel sonuçlar alınmaktadır.

AVANTAJLARI

- Minimum Ağrı / Şoksuz iğne teknolojisi
- Hızlı ve kolay uygulama
- Kısa iyileşme süresi
- Uygulama sonrası hiçbir özel bakım gerektirmemesi
- 3.5 mm'ye varan derinlik kontrolü
- 0.1 mm'lik ayarlanabilir derinlik arttırabilme (0.5 mm- 3.5 mm)
- Kuru cilt geçirgenliği için olası en yüksek enerji aralığı olan 2 MHz kullanımı
- Pürüzlü cilt üzerindeki etkileri minimize eden ileri teknoloji ucu
- 1 ay aralarla 3 seans uygulama ve minimum 1 yıl etkisini koruyabilmesi
- Tüm yaş gruplarına uygulanabilir
- Yan etki oluşmaz
- İğne izi kalmaz
- Morarma ve kanama oluşmaz
- Geri dönüşümlü yüz şekillendirme imkanı sunar
- Biometrik RF (Sadece invaziv RF, kök hücre ve PRP) ile birleştirilebilir.

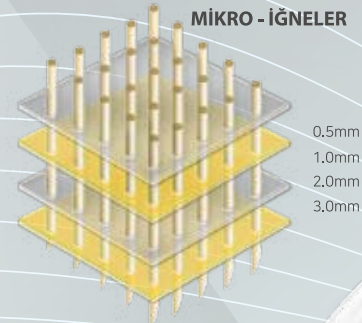

AZ
ORTA
DERİN



YENİLİK- 3 PATENTLİ SPİDER WEB RF

ALLURA VI Fraksiyonel RF cihazımızda tüm bu yeniliklerin yanı sıra birde patentli teknolojisi olarak tıpkı bir örümcek ağı gibi iğne uçlarının aralarında RF vermesi sağlanmıştır. Bu şekilde etki çok daha fazla arttırılmıştır.

Ayrıca başlık ucuna eklenmiş olan Vakumlama teknolojisi sayesinde cilt tamimiyle başlığa sabitlenir ve tüm iğneler eşit oranda ve hızda temas eder. Bu sayede acı minimum ama etki maksimumdur.

Radyofrekans enerjisinin altın iğneler ile doğrudan dermis tabakası içine aktarılması sonucu burada oluşan koagülasyon ile kolajen liflerinde hızlı bir parçalanma sağlanır. Bunun sonucu yeniden organize olan lifler kısa bir süre içinde kasılmayı, toparlanmayı sağlayacak şekle gelirler. Fibroblast hücrelerinin uyarılması ile de yeni kolajen üretimi başlatılır.

KULLANIM ALANLARI

- Total Cilt Rejuvenasyonu (Cilt Gençleştirme, Cilt Yenileme)
- Volumetrik Cilt Germe & Lifting
- Elastikiyet Kaybı Tedavisi (Cilt Sıkılaştırma)
- Yüz ve Çene Hatlarının Belirginleşmesi
- Boyun ve Gıdı Toparlama
- İnce Kırışıklıkların Tedavisi
- Skar Tedavisi (Akne İzleri, Keloid vs.)
- İnflamatuvar Akne Tedavisi
- Genişlemiş Gözenek Tedavisi
- Cilt Tonusunun Düzenlenmesi
- Sebun Dengelenmesi
- Yüz Telenjektazileri Tedavisi
- Pigmente Lezyon (Leke) Tedavisi
- Stria (Cilt Çatlakları) Tedavisi
- Hiperhidroz Tedavisi
- Vücut Sıkılaştırma
- Kol Sarkmalarının Giderilmesi

İĞNE DERİNLİK ÖLÇÜLERİ

AZ
ORTA
DERİN

DERİNLİK
0,5-1 mm

AZ
ORTA
DERİN



DERİNLİK
1,5 mm

AZ
ORTA
DERİN


DERİNLİK
2 mm

AZ
ORTA
DERİN


DERİNLİK
3 mm

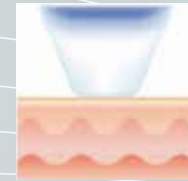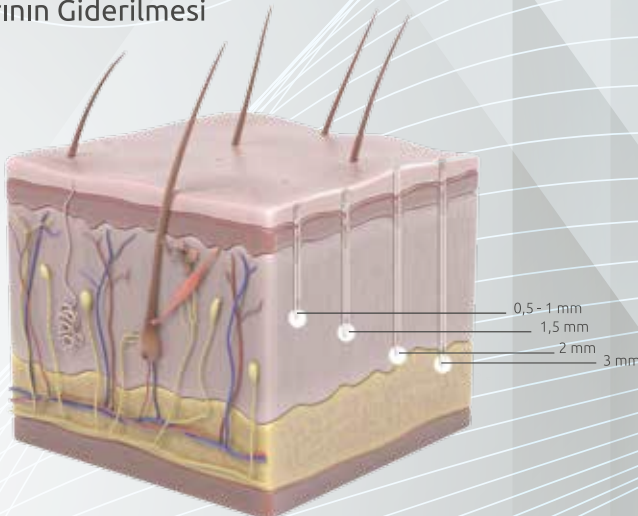


Mikro-iğne başlığı cilt yüzeyine yerleştirilir.

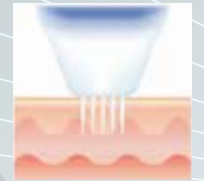

Mikro-iğneler cildin içine nüfus eder.

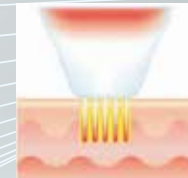

Bipolar RF enerjisi hedeflenen bölgeye doğrudan uygulanır

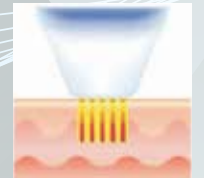

Kolojen yenilenme ve yeni elastik üretim işlemi başlar

TEKNİK ÖZELLİKLER



ÜRÜN İSMİ	ALLURA VI
RF GÜCÜ	80 W
VAKUM SÜRESİ	50 - 950 ms
ATIŞ ARALIĞI	1 - 3 Saniye
VAKUM GÜCÜ	Off - Soft - Normal
DERİNLİK	0.5 - 3.00 mm
FREKANS	2 Mhz, Bipolar
VOLT	220V - 50/60 Hz

KLİNİK SONUÇLAR



Öncesi

Sonrası

Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası